



2498239

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074

Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

www.roszdravnadzor.ru

12.07.2022 № 0120-765/22

На № _____ от _____

О безопасности
медицинских изделий

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения государственной функции по мониторингу безопасности медицинских изделий, находящихся в обращении на территории Российской Федерации, доводит до сведения субъектов обращения медицинского изделия письмо ООО «ДжиИ Хэлскеа», уполномоченного представителя производителя, о новых данных по безопасности при применении медицинских изделий:

- «Аппарат наркозно-дыхательный Avance CS2, Avance CS2 Pro, с принадлежностями», регистрационное удостоверение от 15.07.2015 № РЗН 2015/2830, срок действия не ограничен.

- «Аппарат наркозно-дыхательный Aisys CS2 с принадлежностями», регистрационное удостоверение от 09.04.2018 № РЗН 2015/2807, срок действия не ограничен.

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ООО «ДжиИ Хэлскеа» (123112, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, пом. 1, этаж 14, ком. 30, тел.: +7 (495) 739-69-31, факс: +7 (495) 739-69-32).

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова



СРОЧНЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

GE Healthcare
3000 N. Grandview Blvd. — W440
Waukesha, WI 53188, USA (США)

Дата рассылки письма

Исх. № GEHC: 34128

Кому: Директору отделения респираторной терапии
Заведующему отделением анестезиологии
Администратор службы здравоохранения/специалист по управлению рисками
Директор по биомедицинской/клинической технике

В ответ на: **Основание анестезиологических систем Avance CS², Avance CS² Pro и Aisys CS² может иметь трещину, которая может разойтись при чрезмерной нагрузке. Это может привести к опрокидыванию или потере равновесия анестезиологического аппарата**

**Этот документ содержит важную информацию о вашем изделии. Пожалуйста, убедитесь в том, что все потенциальные пользователи в вашем учреждении ознакомлены с данным уведомлением по безопасности и рекомендуемыми действиями.
Обязательно сохраните этот документ в своем архиве.**

Описание проблемы


Основание анестезиологических систем Avance CS², Avance CS² Pro и Aisys CS² может иметь трещину в определенном месте задней части системы. При чрезмерной нагрузке на анестезиологический аппарат (например, при его перемещении через порог) основание с трещиной может сломаться, что приведет к опрокидыванию или потере равновесия анестезиологической системы, а также к травме, если аппарат упадет на человека.

Мы не располагаем информацией о травмировании из-за возникновения описанной проблемы.

Действия, рекомендуемые клиенту/пользователю

Вы можете продолжить эксплуатацию анестезиологической системы, следуя приведенным ниже инструкциям:

- 1) Осмотрите анестезиологическую систему на наличие трещин в задней части основания, как показано на рисунках ниже.

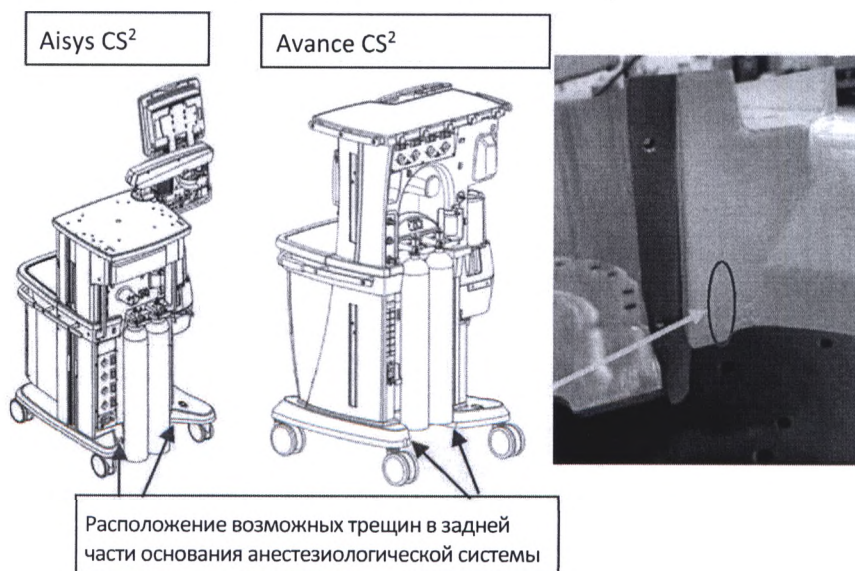

- 2) Если трещины не обнаружены, вы можете и дальше использовать анестезиологическую систему.
- 3) Если же вы обнаружили трещину в задней части анестезиологической системы, как показано на рисунке выше, обратитесь к представителю сервисной службы GE Healthcare.

Вы можете продолжить использовать систему при следующих условиях:

- Ограничьте движение системы. Если требуется переместить анестезиологическую систему, соблюдайте осторожность на неровном полу/пороге и убедитесь, что пол свободен от препятствий (кабелей, шнуров питания и т. п.).
 - Не превышайте рекомендуемый предел веса оборудования, установленного или расположенного на анестезиологической системе.
- 4) Заполните прилагаемую форму для подтверждения, что вы получили уведомление о медицинском устройстве, и отправьте ее по следующему адресу: FMI34128.BASECRACKS@ge.com

Затронутые устройства

Анестезиологические системы Avance CS² и Avance CS² Pro:
Номер по каталогу: 1009-9050-000 - GTIN: 00840682102322
Анестезиологические системы Aisys CS²
Номер по каталогу: 1011-9050-000 - GTIN: 00840682102292
Перечень затронутых систем см. в сопутствующем приложении.

Предусмотренное применение

Анестезиологические системы GE Datex-Ohmeda предназначены для обеспечения общей ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких широкого круга пациентов (новорожденных, детей и взрослых). Устройство обеспечивает принудительную вентиляцию по объему или давлению.

Исправление изделия

GE Healthcare проверит и при необходимости бесплатно исправит все дефектные изделия. Представитель GE Healthcare свяжется с вами, чтобы организовать исправление.

Контактная информация

Если у вас есть вопросы или проблемы, касающиеся этого уведомления, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GE Healthcare по сервису/продажам.
Тел.+7 (495) 739 69 67 или 8 (800) 333 69 67 (бесплатно по России);
E-mail: 88003336967@ge.com.

Мы подчеркиваем, что поддержание высокого уровня безопасности и качества является нашей первоочередной задачей. Обращайтесь к нам по указанным выше контактным данным. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы.

С уважением,



Laila Gurney



Jeff Hersh, PhD MD

Chief Quality & Regulatory Officer
GE Healthcare

Chief Medical Officer
GE Healthcare



GE Healthcare

Исх. № GEHC: 34128

**ОТВЕТ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ, ЧТО УВЕДОМЛЕНИЕ О МЕДИЦИНСКОМ
УСТРОЙСТВЕ ПОЛУЧЕНО, ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ**

Заполните этот бланк и верните его в компанию GE Healthcare в кратчайшие сроки после получения (не позднее, чем через 30 дней после получения). Тем самым вы подтвердите получение и понимание Уведомления об исправлении медицинского устройства.

* Имя клиента/получателя:

Улица и номер дома:

Город /область / страна / почтовый индекс:

* Адрес электронной почты клиента:

* Номер телефона:

Впишите требуемую информацию и отправьте обратно одним из указанных ниже способов.

- Мы подтверждаем получение и понимание прилагаемого Уведомления о медицинском устройстве, а также подтверждаем, что информировали соответствующий персонал и приняли и будем принимать надлежащие меры в соответствии с этим Уведомлением.

Укажите Ф.И.О. ответственного лица, заполнившего этот бланк.

Подпись:

* ФИО (печатными буквами):

* Должность:

* Дата (ДД/ММ/ГГГГ):

* Поля, обязательные для заполнения.

Верните заполненный бланк, отсканировав или сфотографировав его и отправив по электронной почте по адресу: FMI34128.BASECRACKS@ge.com



ПРИЛОЖЕНИЕ**Затронутые анестезиологические системы Avance CS² и Avance CS² Pro**

APKA00600	APKA01237	APKA01325	APKA01370	APKA01414	APKA01456	APKA01500	APKA01568
APKA00601	APKA01238	APKA01326	APKA01371	APKA01415	APKA01457	APKA01501	APKZ00267
APKA00602	APKA01239	APKA01327	APKA01372	APKA01416	APKA01458	APKA01504	APKZ00524
APKA00789	APKA01240	APKA01328	APKA01373	APKA01417	APKA01459	APKA01505	APKZ02234
APKA00790	APKA01241	APKA01329	APKA01374	APKA01418	APKA01460	APKA01506	
APKA00795	APKA01242	APKA01330	APKA01375	APKA01419	APKA01461	APKA01507	
APKA00796	APKA01243	APKA01331	APKA01376	APKA01420	APKA01462	APKA01508	
APKA00797	APKA01244	APKA01332	APKA01377	APKA01421	APKA01463	APKA01509	
APKA00864	APKA01245	APKA01333	APKA01378	APKA01422	APKA01464	APKA01510	
APKA00867	APKA01246	APKA01334	APKA01379	APKA01423	APKA01465	APKA01511	
APKA00868	APKA01247	APKA01335	APKA01380	APKA01424	APKA01466	APKA01512	
APKA00869	APKA01248	APKA01336	APKA01381	APKA01425	APKA01467	APKA01525	
APKA00945	APKA01249	APKA01337	APKA01382	APKA01426	APKA01469	APKA01537	
APKA00993	APKA01250	APKA01338	APKA01383	APKA01427	APKA01470	APKA01538	
APKA01055	APKA01251	APKA01339	APKA01384	APKA01428	APKA01471	APKA01539	
APKA01056	APKA01252	APKA01340	APKA01385	APKA01429	APKA01472	APKA01540	
APKA01057	APKA01253	APKA01341	APKA01386	APKA01430	APKA01473	APKA01541	
APKA01112	APKA01254	APKA01342	APKA01389	APKA01431	APKA01474	APKA01543	
APKA01113	APKA01255	APKA01343	APKA01390	APKA01432	APKA01475	APKA01544	
APKA01114	APKA01256	APKA01344	APKA01391	APKA01433	APKA01476	APKA01545	
APKA01124	APKA01257	APKA01345	APKA01392	APKA01434	APKA01477	APKA01546	
APKA01125	APKA01258	APKA01346	APKA01393	APKA01435	APKA01478	APKA01547	
APKA01126	APKA01288	APKA01347	APKA01394	APKA01436	APKA01479	APKA01548	
APKA01127	APKA01289	APKA01348	APKA01395	APKA01437	APKA01480	APKA01549	
APKA01128	APKA01290	APKA01349	APKA01396	APKA01438	APKA01481	APKA01550	
APKA01129	APKA01291	APKA01352	APKA01397	APKA01439	APKA01482	APKA01551	
APKA01130	APKA01292	APKA01353	APKA01398	APKA01440	APKA01483	APKA01552	
APKA01131	APKA01293	APKA01355	APKA01399	APKA01441	APKA01484	APKA01553	
APKA01132	APKA01298	APKA01356	APKA01400	APKA01442	APKA01485	APKA01554	
APKA01133	APKA01299	APKA01357	APKA01401	APKA01443	APKA01486	APKA01555	
APKA01139	APKA01300	APKA01358	APKA01402	APKA01444	APKA01487	APKA01556	
APKA01140	APKA01301	APKA01359	APKA01403	APKA01445	APKA01488	APKA01557	
APKA01141	APKA01302	APKA01360	APKA01404	APKA01446	APKA01489	APKA01558	
APKA01203	APKA01303	APKA01361	APKA01405	APKA01447	APKA01490	APKA01559	
APKA01204	APKA01304	APKA01362	APKA01406	APKA01448	APKA01491	APKA01560	
APKA01205	APKA01318	APKA01363	APKA01407	APKA01449	APKA01492	APKA01561	
APKA01208	APKA01319	APKA01364	APKA01408	APKA01450	APKA01493	APKA01562	
APKA01210	APKA01320	APKA01365	APKA01409	APKA01451	APKA01494	APKA01563	
APKA01211	APKA01321	APKA01366	APKA01410	APKA01452	APKA01495	APKA01564	
APKA01228	APKA01322	APKA01367	APKA01411	APKA01453	APKA01496	APKA01565	
APKA01229	APKA01323	APKA01368	APKA01412	APKA01454	APKA01498	APKA01566	
APKA01230	APKA01324	APKA01369	APKA01413	APKA01455	APKA01499	APKA01567	

Анестезиологические системы Aisys CS²

APWA00734	APWA01413	APWA01552	APWA01634	APWA01676	APWA01720	APWA01768	APWA01813
APWA00735	APWA01414	APWA01553	APWA01635	APWA01677	APWA01721	APWA01769	APWA01818
APWA00736	APWA01415	APWA01554	APWA01636	APWA01678	APWA01722	APWA01770	APWA01819
APWA00737	APWA01443	APWA01555	APWA01637	APWA01679	APWA01723	APWA01771	APWA01820
APWA00738	APWA01444	APWA01556	APWA01638	APWA01680	APWA01724	APWA01772	APWA01821
APWA00739	APWA01445	APWA01557	APWA01639	APWA01681	APWA01725	APWA01773	APWA01822
APWA00740	APWA01447	APWA01567	APWA01640	APWA01682	APWA01726	APWA01774	APWA01823
APWA01111	APWA01487	APWA01568	APWA01641	APWA01685	APWA01727	APWA01775	APWA01824
APWA01112	APWA01488	APWA01569	APWA01642	APWA01686	APWA01728	APWA01776	APWA01825
APWA01113	APWA01491	APWA01570	APWA01643	APWA01687	APWA01729	APWA01777	APWA01826
APWA01114	APWA01492	APWA01591	APWA01644	APWA01688	APWA01730	APWA01778	APWA01827
APWA01115	APWA01493	APWA01592	APWA01645	APWA01689	APWA01731	APWA01779	APWA01828
APWA01116	APWA01508	APWA01593	APWA01646	APWA01690	APWA01732	APWA01780	APWA01829
APWA01133	APWA01509	APWA01594	APWA01647	APWA01691	APWA01733	APWA01781	APWA01830
APWA01162	APWA01510	APWA01602	APWA01648	APWA01692	APWA01734	APWA01782	APWA01831
APWA01163	APWA01514	APWA01603	APWA01649	APWA01693	APWA01735	APWA01784	APWA01832
APWA01197	APWA01515	APWA01605	APWA01650	APWA01694	APWA01736	APWA01785	APWA01833
APWA01198	APWA01516	APWA01609	APWA01651	APWA01695	APWA01737	APWA01786	APWA01834
APWA01199	APWA01517	APWA01610	APWA01652	APWA01696	APWA01738	APWA01787	APWA01835
APWA01200	APWA01518	APWA01611	APWA01653	APWA01697	APWA01739	APWA01788	APWA01836
APWA01201	APWA01519	APWA01612	APWA01654	APWA01698	APWA01740	APWA01789	APWA01837
APWA01202	APWA01520	APWA01613	APWA01655	APWA01699	APWA01741	APWA01790	APWA01838
APWA01203	APWA01521	APWA01614	APWA01656	APWA01700	APWA01742	APWA01791	APWA01839
APWA01204	APWA01522	APWA01615	APWA01657	APWA01701	APWA01743	APWA01792	APWA01840
APWA01207	APWA01523	APWA01616	APWA01658	APWA01702	APWA01744	APWA01793	APWA01841
APWA01214	APWA01524	APWA01617	APWA01659	APWA01703	APWA01745	APWA01794	APWA01842
APWA01215	APWA01525	APWA01618	APWA01660	APWA01704	APWA01746	APWA01795	APWA01843
APWA01223	APWA01526	APWA01619	APWA01661	APWA01705	APWA01747	APWA01796	APWA01844
APWA01228	APWA01532	APWA01620	APWA01662	APWA01706	APWA01748	APWA01797	APWA01845
APWA01235	APWA01534	APWA01621	APWA01663	APWA01707	APWA01749	APWA01798	APWA01846
APWA01238	APWA01535	APWA01622	APWA01664	APWA01708	APWA01750	APWA01799	APWA01847
APWA01297	APWA01541	APWA01623	APWA01665	APWA01709	APWA01751	APWA01800	APWA01848
APWA01298	APWA01542	APWA01624	APWA01666	APWA01710	APWA01752	APWA01801	APWA01849
APWA01311	APWA01543	APWA01625	APWA01667	APWA01711	APWA01753	APWA01802	APWA01850
APWA01319	APWA01544	APWA01626	APWA01668	APWA01712	APWA01754	APWA01803	APWA01851
APWA01320	APWA01545	APWA01627	APWA01669	APWA01713	APWA01755	APWA01804	APWA01852
APWA01337	APWA01546	APWA01628	APWA01670	APWA01714	APWA01756	APWA01805	APWA01853
APWA01406	APWA01547	APWA01629	APWA01671	APWA01715	APWA01757	APWA01808	APWA01854
APWA01407	APWA01548	APWA01630	APWA01672	APWA01716	APWA01758	APWA01809	APWA01855
APWA01408	APWA01549	APWA01631	APWA01673	APWA01717	APWA01759	APWA01810	APWA01856
APWA01409	APWA01550	APWA01632	APWA01674	APWA01718	APWA01760	APWA01811	APWA01857
APWA01410	APWA01551	APWA01633	APWA01675	APWA01719	APWA01767	APWA01812	APWA01858

APWA01859
APWA01860
APWA01861
APWA01862
APWA01863
APWA01864
APWA01865
APWA01866
APWA01867
APWA01868
APWA01869
APWA01870
APWA01871
APWA01872
APWA01873
APWA01874
APWA01875
APWA01876
APWA01877
APWA01878
APWA01879
APWA01880
APWA01881
APWA01882
APWA01886
APWA01907
APWX03094
APWY00164
APWZ01918
APWZ01919
APWZ01920
APWZ02225
APWZ02458



СРОЧНЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

GE Healthcare
3000 N. Grandview Blvd. — W440
Waukesha, WI 53188, USA (США)

Дата рассылки письма

Исх. № GEHC: 34129

Кому: Заведующий отделением анестезиологии
Директор по биомедицинской/клинической технике
Администратор службы здравоохранения/специалист по управлению рисками

КАСАТЕЛЬНО: Наркозные станции Aisys CS², Avance CS² и Avance CS² Pro : потенциально перепутанное подключение датчиков давления в кислородном и воздушном баллонах

Этот документ содержит важную информацию о вашем изделии. Пожалуйста, убедитесь в том, что все потенциальные пользователи в вашем учреждении ознакомлены с данным уведомлением по безопасности и рекомендуемыми действиями. Обязательно сохраните этот документ в своем архиве.

Описание проблемы

В наркозных станциях Certain Aisys CS², Avance CS² и Avance CS² Pro Anesthesia Systems, выпущенных в период с 1 января 2021 г. по 23 апреля 2022 г. может быть перепутана информация датчиков давления в кислородном и воздушном баллонах. Наркозная станция может выводить данные о давлении в кислородном баллоне на то место, где должно показываться давление в воздушном баллоне, а данные о давлении в воздушном баллоне — на место давления в кислородном. Подача газов подключена правильно, но отображаемая на дисплее информация о давлении в баллонах будет переставлена местами.

Это может привести к длительной гипоксии в редких случаях, когда запас газа в кислородном баллоне иссякает в то время, как подача воздуха и кислорода по трубам недоступна, оба баллона задействованы, но показатели их эксплуатации не измеряются должным образом.

Мы не располагаем информацией о травмировании из-за возникновения описанной проблемы.

Действия, рекомендуемые клиенту/пользователю

Вы можете продолжить эксплуатацию наркозной станции, предварительно ознакомившись с приведенными ниже инструкциями и следуя им:

1. Убедитесь, что на экране отображается меню «Состояние станции», нажав клавишу **System Setup (Настройка станции)** и выбрав пункт **System Status (Состояние станции)**.
2. Убедитесь, что все баллоны полностью закрыты и в меню «Состояние станции» для каждого баллона указан ноль.
3. **По очереди** откройте вентиль каждого баллона и проверьте, чтобы появившееся на экране значение, отображало давление в том баллоне, который сейчас открыт.
4. Если данные выведены на экран в соответствующем открытому баллону месте, эксплуатацию наркозной станции можно продолжать. Ваша станция прошла испытание, она не затронута описанной проблемой.
5. Если данные выведены на экран не в соответствующем открытому баллону месте, но вы хотите продолжать эксплуатацию наркозной станции, убедитесь, что:

- a. до начала использования аппарата в вашем учреждении было налажено газоснабжение по трубам и все баллоны с газами наполнены;
 - b. доступен резервный способ подачи газов, например мешок Амбу;
 - c. все пользователи дефектного изделия уведомлены о проблеме;
 - d. если баллоны задействованы, помните о том, что данные о давлении в кислородном и воздушном баллонах поменяны местами.
6. Заполните прилагаемую форму для подтверждения того, что вы получили уведомление о медицинском устройстве, и отправьте ее по следующему адресу: FMI34129.AisysTransducer@ge.com

Затронутые устройства

Наркозные станции Aisys CS²: Н/К: 1011-9050-000 - GTIN: 00840682102292

Наркозные станции Avance CS² и Avance CS² Pro:
Н/К: 1009-9050-000 - GTIN: 00840682102322

Перечень затронутых станций см. в сопутствующем Приложении.

Предусмотренное применение

Наркозные станции GE Datex-Ohmeda предназначены для обеспечения общей ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких широкого круга пациентов (новорожденных, детей и взрослых). Оборудование предназначено для вентиляции легких с контролем объема или давления, которая выполняется медицинским специалистом, обладающим квалификацией, необходимой для проведения общей анестезии.

Устранение неисправностей изделия


Компания GE Healthcare бесплатно исправит все дефектные изделия. Представитель GE Healthcare свяжется с вами, чтобы организовать устранение неисправности.

Контактная информация

Если у вас есть вопросы или проблемы, касающиеся этого уведомления, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GE Healthcare по сервису/продажам.
Тел.+7 (495) 739 69 67 или 8 (800) 333 69 67 (бесплатно по России);
E-mail: 88003336967@ge.com .

Мы подчеркиваем, что поддержание высокого уровня безопасности и качества является нашей первоочередной задачей. Обращайтесь к нам по указанным выше контактными данным. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы.

С уважением,

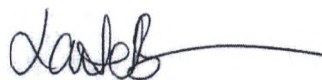

Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE Healthcare



Jeff Hersh, PhD MD
Chief Medical Officer
GE Healthcare

Приложение А

Серийные номера затронутых систем

Avance CS2 и Avance CS2 Pro:

Номера с серией APKA

От 00101 до 00105, от 00107 до 00165, от 00167 до 00176, от 00178 до 00218, от 00220 до 00767, от 00776 до 00836, от 00838 до 01081, от 01084 до 01150, от 01152 до 01467, от 01469 до 01532, от 01537 до 01541, от 01543 до 01809, от 01811 до 01894, от 01921 до 01961, от 01965 до 01985, от 02009 до 02013, от 02016 до 02029

Номера с серией APKB

От 00101 до 00108, от 00110 до 00121, от 00123 до 00265, от 00269 до 00293, от 00295 до 00417, от 00422 до 00438, от 00441 до 00452, 00462, от 00464 до 00473, 00478, от 00480 до 00487, от 00490 до 00492, от 00495 до 00513, от 00515 до 00517

APKZ00247, 00506, 02331, 02336, 02337, от 02510 до 02569

Aisys CS2:

Номера с серией APWA

От 00101 до 00176, от 00185 до 00697, от 00700 до 00763, от 00768 до 01013, от 01016 до 01216, от 01218 до 01223, от 01225 до 01596, от 01601 до 01683, от 01685 до 01805, от 01808 до 01960, от 01964 до 01999, от 02003 до 02021, от 02026 до 02168, 02175, от 02182 до 02308, от 02311 до 02361, от 02376 до 02405, от 02424 до 02429, от 02450 до 02456, от 02519 до 02531, от 02533 до 02539

Номера с серией APWB

От 00101 до 00151, 00154, 00155, 00162, 00163, от 00169 до 00199, от 00201 до 00336, от 00338 до 00373, от 00378 до 00644, от 00647 до 00684, от 00686 до 00689, от 00691 до 00743, от 00746 до 00750, от 00754 до 00756, от 00770 до 00818, от 00823 до 00828, от 00838 до 00842, от 00905 до 00931, от 00944 до 00952

Номера с серией APWZ

От 03034 до 03037, от 03053 до 03056, 03060, от 03062 до 03066, от 03071 до 03075, от 03164 до 03171, от 03311 до 03314, 03319, 03320, от 03381 до 03415, от 03420 до 03422

**ОТВЕТ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ, ЧТО УВЕДОМЛЕНИЕ О
МЕДИЦИНСКОМ УСТРОЙСТВЕ ПОЛУЧЕНО, ЯВЛЯЕТСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ**

Заполните этот бланк и верните его в компанию GE Healthcare в кратчайшие сроки после получения (не позднее, чем через 30 дней после получения). Тем самым вы подтвердите получение и понимание Уведомления об исправлении медицинского устройства.

- * Имя клиента/получателя: _____
- Улица и номер дома: _____
- Город /область / страна / почтовый индекс: _____
- * Адрес электронной почты клиента: _____
- * Номер телефона: _____

Мы подтверждаем получение и понимание «Уведомления об исправлении медицинского изделия» и выполняем инструкции, приведенные в данном уведомлении. Ниже приведены результаты наших испытаний на основе предоставленных инструкций.

См. следующую страницу, чтобы задокументировать информацию о серийных номерах дополнительных наркозных станций.

Серийный номер наркозной станции	Pass (прошла) или Fail (не прошла)	Дата испытания
ABCD123456		ДД-ММ-ГГГГ

Укажите Ф. И. О. ответственного лица, заполнившего этот бланк.

- Подпись: _____
- * ФИО (печатными буквами): _____
- * Должность: _____
- * Дата (ДД/ММ/ГГГГ): _____
- * Поля, обязательные для заполнения.

